

# RECOMENDACIONES PARA **LIMPIEZA** Y **DESINFECCIÓN** DE PANTALLAS FACIALES

**1**

Tras su retirada, la pantalla se desechará en un contenedor (si fuera posible, cerrado) y se llevará a la zona de limpieza de material reutilizable.

**2**

Se lavará con un **detergente enzimático** (siguiendo las instrucciones del fabricante), sumergiendo la pantalla en un recipiente con el detergente hasta que lo cubra por completo.

**3**

Se aclarará **abundantemente con agua.**

**4**

Se secará (al aire o con papel desechable).

**5**

Se desinfectará utilizando una gasa impregnada en **alcohol de 70º**, insistiendo en la parte externa de la misma.

**6**

Se dejará **secar al aire antes de su reutilización.**

(\*) Esta pauta podrá ser adaptada de acuerdo a la política de desinfección y los protocolos del centro aprobados por el Servicio de Medicina Preventiva.